

K-System DENTAK®

Protocolo operatório:



- Verificar a estabilidade do trépano sobre a lâmina;
- Montar a BTTO sobre um contra-ângulo ou uma peça de mão;
- Exercer uma ligeira tracção sobre o instrumento para verificar se está no local;
- Verificar o sentido de rotação da BTTO antes de cada utilização. Um sentido de rotação inverso pode desenroscar o tubo trépano da broca-lâmina;
- Perfurar;
- Trabalhar sob irrigação e a baixa velocidade (500 rpm máx.);
- Não furar para além da marca dos 11mm.



Retirar a BTTO do contra-ângulo
Desmontar o tubo trépano da broca-lâmina



Montar o tubo trépano na seringa



Injectar o osso triturado no local receptor