

Identium®

Adhesive

Vendas nos EEUU: **Kettenbach LP**

7777 Center Avenue, Suite 280

Huntington Beach, CA 92647

USA

Apenas para uso odontológico por profissional especializado.

Adesivo para materiais de impressão Identium® (Vinylsiloxanéter) ISO 4823

Made in Germany
37404/5009

Descrição do produto/Indicação

Adesivo para materiais de impressão (Vinylsiloxanéter) Identium®, para sua adesão sobre metais e plásticos.

Indicações para sua manipulação

Aplicar com pincel uma camada fina de Identium® Adhesive sobre a cubeta de moldagem seca e deixar secar por aproximadamente 5 minutos. Cobrir a cubeta com material de moldagem suficiente. Em caso de moldelras de material sintético, favor verificar a compatibilidade do adesivo. Fechar a garrafa imediatamente após o uso!

Aplicar a mistura de material de impressão sobre a moldeira dentro de 30 minutos.

Ao limpar os portadores de materiais, pode-se remover os restos do material de impressão com benzina, éter de petróleo ou óleo de laranja.

Advertências

Não utilizar Identium® Adhesive com siliconas por adição, siliconas por condensação, poliéteres ou polissulfetos polimerizantes.

Medidas de precaução

Não utilizar após a data de vencimento do produto.

Não ingerir o material! Em caso de ingestão não intencionada do material: Caso surgirem ou persistirem problemas, consulte um médico.

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

Não permitir que o material entre em contacto com a mucosa.

Para evitar danos ambientais, não eliminar na canalização ou nos rios ou lagos (risco de poluição das águas). Não eliminar com o desperdícios caseiros.

Evitar o contacto com as roupas, pois o material não pode ser removido mediante lavagem à seco.

Manter distante de fontes de ignição, faíscas ou fogo aberto.

Efeitos secundários

Apesar de se desconhecer efeitos secundários sistémicos, não se pode excluir, em casos raros, a possibilidade da ocorrência de alergias específicas no contacto. Não se deve utilizar o material, caso se saiba que o paciente é alérgico a qualquer dos componentes.

Composição

Resina de silicón, solvente (acetato de etila, xilol).

Armazenamento

Manter à temperatura ambiente (18 – 25 °C/64 – 77 °F).



- R 11 Facilmente inflamável.
- R 20/21 Nocivo à saúde ao inspirar ou entrar em contacto com a pele.
- R 36 Irritante para os olhos.
- R 66 Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.
- R 67 Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.


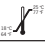




Marcas registradas

Kettenbach e Identium® Adhesive são marcas registradas da Kettenbach GmbH & Co. KG.

Nota

Alguns materiais da Kettenbach podem ser obtidos somente em determinados países.

Legenda

Conformidade com MDD 93/42/CCE	CE	A ser utilizado até	
Limite de temperatura		Manter em local seco	
Proteger contra a luz do sol		Nº de catálogo	REF
Nº do lote		Atenção, consultar os documentos fornecidos	
Sistema dual (apenas para a Alemanha)		Rx only	
		Apenas para uso odontológico por profissional especializado.	
Facilmente inflamável.		Irritante	

Os dados sobre os produtos da Kettenbach baseiam-se em extensa pesquisa e experiência técnica prática.

Nós colocamos os resultados à sua disposição, mas nos reservamos o direito a alterações técnicas no desenvolvimento do produto.

No entanto, o usuário destes produtos não está isento da responsabilidade de observar e seguir as recomendações e as informações de uso.

Informações actualizadas em: Oitavo Dezembro 2009