

Panasil®

Adesivo

Adesivo para materiais de impressão de adição de Kettenbach.

Vendas nos EEUU: **Kettenbach LP**
 400 Oser Ave., Suite 1650
 Hauppauge, NY 11788
 USA

Apenas para uso odontológico por profissional especializado.

Made in Germany
 37034/5111



Descrição do produto/Indicaçãoção

Adesivo para materiais de impressão e impressão rebasada de adição, para sua adesão sobre metais e plásticos de Kettenbach.

Indicações para sua manipulação

Pincelar finamente a moldeira com Panasil® adesivo e deixar secar por uns 5 minutos. Calor e ar pressurizado reduzem o tempo de cura. Em caso de moldeiras de material sintético, favor verificar a compatibilidade do adesivo. Fechar a garrafa imediatamente após o uso!

Aplicar a mistura de material de impressão sobre a moldeira dentro de 30 minutos.

Após limpar os portadores de materiais, pode-se remover os restos do material de impressão com benzina, éter de petróleo ou óleo de laranja.

Advertências

Não utilizar Panasil® adesivo com siliconas por condensação, poliéteres ou polissulfetos e polimerizantes.

Medidas de precaução

Não utilizar após a data de vencimento do produto.

Não ingerir o material! Em caso de ingestão não intencionada do material: Caso surgirem ou persistirem problemas, consulte um médico.

Evite o contacto com os olhos. Em caso de contacto acidental com os olhos: imediatamente enxaguar bem com ducha de olhos ou água. Se surgirem ou persistirem problemas, consulte um médico.

Evitar o contacto com a pele.

Para evitar danos ambientais, não eliminar na canalização ou nos rios ou lagos (risco de poluição das águas). Não eliminar com o desperdícios caseiros.

Evitar o contacto com as roupas, pois o material não pode ser removido mediante lavagem à seco.

Manter distante de fontes de ignição, faíscas ou fogo aberto.

Efeitos secundários

Apesar de se desconhecer efeitos secundários sistémicos, não se pode excluir, em casos raros, a possibilidade da ocorrência de alergias específicas no contacto. Não se deve utilizar o material, caso se saiba que o paciente é alérgico a qualquer dos componentes.

Composição

Resina de silicona, solvente (acetato de etila, xilol).

Armazenamento

Guardar em local seco, protegido da luz solar, armazenar à temperatura ambiente, evitar gamas de temperaturas extremas.



R 11	Facilmente inflamável.
R 20/21	Nocivo por inalação e em contacto com a pele.
R 36	Irritante para os olhos.
R 66	Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.
R 67	Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

Marcas registradas

Kettenbach e Panasil® adesivo são marcas registradas da Kettenbach GmbH & Co. KG.

Nota

Alguns materiais da Kettenbach podem ser obtidos somente em determinados países.

Legenda

Conformidade com MDD 93/42/CCE		A ser utilizado até	
Limite de temperatura		Manter em local seco	
Proteger contra a luz do sol		Nº de catálogo	REF
Nº do lote		Atenção, consultar os documentos fornecidos	
Sistema dual (apenas para a Alemanha)		Rx only	
Facilmente inflamável.		Apenas para uso odontológico por profissional especializado.	
		Irritante	

Limitação de responsabilidade

Caso uma exclusão de responsabilidade for permitida por lei, a Kettenbach GmbH não assume nenhuma responsabilidade por perdas ou danos causados por este produto, indiferente se o caso se tratar de um dano directo, indirecto, especial, colateral ou subsequente, independente da legislação vigente, inclusive garantia, contracto, negligência ou premeditação.

Os dados sobre os produtos da Kettenbach baseiam-se em extensa pesquisa e experiência técnica prática.

Nós colocamos os resultados à sua disposição, mas nos reservamos o direito a alterações técnicas no desenvolvimento do produto. No entanto, o usuário destes produtos não está isento da responsabilidade de observar e seguir as recomendações e as informações de uso.